

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESINFECTANTE PARA MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS CON ÁCIDO PERACÉTICO



Health & Biotechnology
www.glscolombia.com

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMERCIAL	DESINFECTANTE PARA MAQUINAS DE HEMODIÁLISIS CON ÁCIDO PERACÉTICO
MARCA	ACTODIACIT PA
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2014DM-0011738 Vigente hasta: 29 de agosto de 2024
TIPO DE DISPOSITIVO	No Invasivo
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA
FABRICANTE	ACTO GmbH Büchner Strasse 11, D-38118 Braunschweig Tel: +0 531-239 508-0
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	GLS Health & Biotechnology S.A. Carrera 17 # 145A - 62. Bogotá, Colombia Tel: (57+1) 527 1429 / 30



DESCRIPCIÓN

Actodiacit PA se utiliza para la desinfección de alto nivel en máquinas de hemodiálisis con sistemas volumétricos y abiertos. Es eficaz contra un amplio espectro microbiano en tiempos de contacto cortos y bajas concentraciones. Disuelve y elimina los depósitos de calcio y residuos de sangre. Es ambientalmente seguro y compatible con materiales plásticos como el PE o PP.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Diluya la solución a 1/25 con agua purificada por ósmosis inversa. El desinfectante es absorbido automáticamente a través de la pipeta de desinfección en las máquinas de hemodiálisis. Para descalcificación + desinfección, utilice el segundo programa. Para descalcificación utilice el primer programa para máquinas sin programa de desinfección integrado, realizar lavado del sistema cerrado con agua purificada por ósmosis inversa después de la desinfección.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Evitar el contacto de la sustancia desinfectante con las manos. No utilice para limpieza de manos, rostro, cuerpo y productos alimenticios. Mantener fuera del alcance de los niños y dentro de su envase original en una posición vertical.

ESPECIFICACIONES

Composición Química	Cada 100g contiene: 3.5g Ácido peracético, 1.0g inhibidores de corrosión y sustancias auxiliares.
Actividad Microbiana	Bactericida, fungicida, tbc, virucida (HBV/HCV, HIV, Adenovirus, Rotavirus, Poliovirus, Vaccinia virus, etc.). Duración del efecto: 2% -30 min; 0,5% -60 min
Estabilidad / Vida útil	3 años en su empaque original y sin destapar.
Condiciones de almacenamiento	- Conservar en un lugar fresco y seco. - Proteger de los rayos directos del sol. - Almacenar a temperatura ambiente inferior a +25°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Código	Referencia	Presentación
01.8305.5	Actodiacit PA x 5L	Frasco de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)